

Schön,

dass Sie Ihren Patient\*innen mit der AuraSchiene helfen.

ORTHOS

Unser **Tipp**, wenn die AuraSchiene eingeschliffen werden muss:

1. Nutzen Sie am besten eine dünne, einseitige Okklusionsfolie (z.B. 12 $\mu$ ).
2. Zum Einschleifen empfiehlt sich eine kreuzverzahnte Fräse. Bei dieser ist unbedingt zu beachten, dass die Drehzahl hoch genug ist.
3. Die eingeschliffenen Bereiche dann mit einem braunen, harten Korundschleifer glätten. Auch hier wieder eine höhere Drehzahl anwenden.
4. Die überschüssige Farbe auf der Schiene entfernen Sie am besten mit hochprozentigem Alkohol und einem Papierhandtuch. Noch besser funktionieren - falls vorhanden - Bimsstein und eine Ziegenhaarbürste. Danach kurz ins Ultraschallbad.



Sehen Sie sich unser  
Erklärvideo hierzu an:

[www.orthos.de/downloads](http://www.orthos.de/downloads)

Viel Erfolg!

*Aura*  
SCHIENE